



CONSIGNES REALISATION ET ENVOI DES PRELEVEMENTS CONSTITUTIONNELS (DOM TOM) AURAGEN FILIERE MALADIE RARE

1 PRELEVEMENT

Prélèvement dans des tubes en plastique en présence d'EDTA (bouchon violet) pour le patient et chacun de ses parents biologiques.

- Pour les adultes : 2 ml minimum
- Pour les enfants de 6 mois à 15 ans : 1 ml minimum
- Pour les enfants de moins de 6 mois : 0,5 ml minimum

Par exemple :

- Tube EDTA 13X75 4ml (BD REF 367861 ou BD REF 367862)
- Tube EDTA 13X75 2ml (BD REF 367241)



2 ETIQUETAGE

- Option 1 :

Utilisez vos propres étiquettes pour identifier les tubes de prélèvement, Collez-en un exemplaire à l'emplacement prévu à cet effet sur la feuille de transfert.

- Option 2 :

Utilisez la planche d'étiquettes éditable depuis le formulaire de prescription sur HYGEN (<https://hygen.auragen.fr>).

3 CONSERVATION

Température ambiante [15-25°C] ou +4°C si la température des locaux n'est pas régulée pendant 10 jours (du prélèvement à l'extraction d'ADN).

Les échantillons doivent nous être acheminés rapidement afin de respecter ce délai.

En cas d'impossibilité d'envoi des prélèvements, ceux-ci doivent être stockés à +4°C jusqu'à leur prise en charge par le transporteur.



4 EMBALLAGE

- Insertion des tubes dans un sac Diagnobag taille A5 homologué UN3373 muni d'un adsorbant interne.



- Rangement des feuilles de transfert accompagnant les tubes dans la pochette externe du sac. (Le même sac peut être utilisé pour insérer les tubes de prélèvement d'autres familles).
- Rangement du ou des sacs Diagnobag dans un colis de 5 litres.
- Caler les sachets Diagnobag dans le colis de manière à limiter l'impact des chocs éventuels.
- Fermeture du colis avec des scellés.. Le colis est alors prêt à l'envoi.

5 DEMANDE D'ENLEVEMENT

Les demandes d'enlèvement sont à réaliser selon les conditions communiquées par le transporteur, habilité à réaliser ce type de transport depuis les DROM-COM.

Les colis sont réceptionnés sur le LBMMS AURAGEN du lundi au vendredi.

Il est recommandé qu'un mail indiquant qu'un colis a été expédié soit envoyé au secretariat@auragen.fr.

Les colis sont à manipuler avec précaution.

En cas de jours fériés, à voir au cas par cas.

Echantillons constitutionnels Température ambiante (sang)	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Jour de prélèvement	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Jour de réception au laboratoire AURAGEN	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui