



# CONSIGNES REALISATION ET ENVOI DES PRELEVEMENTS CONSTITUTIONNELS ET SOMATIQUES FFPE (DROM COM) AURAGEN FILIERE CANCER

## 1 PRELEVEMENTS

### 1.1 Prélèvement constitutionnel

1 prélèvement *de sang* dans un tube en plastique en présence d'EDTA (bouchon violet) **non périmé** pour le patient.

- Pour les adultes : 2 ml minimum
- Pour les enfants de 6 mois à 15 ans : 1 ml minimum
- Pour les enfants de moins de 6 mois : 0,5 ml minimum

Par exemple :

- Tube EDTA 13X75 4ml (BD REF 367861 ou BD REF 367862)
- Tube EDTA 13X75 2ml (BD REF 367241)

**Dans le cadre de la politique d'épargne sanguine, merci de prélever 1 seul tube.**

### 1.2 Prélèvement somatique

2 microtubes\* type Eppendorf 1,5 ml « safe lock » ou que vous aurez entouré(s) avec du parafilm contenant chacun des **coupes/copeaux de tissu tumoral FFPE**.

**\*Attention :** Si envoi d'1 seul tube, l'examen WGS à partir d'une extraction d'ADN sera priorisé (Pas d'analyse RNAseq).



## 2 IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS

### 2.1 Etiquetage des tubes

- Option 1 :

Utilisez vos propres étiquettes pour identifier les tubes de prélèvement,



Collez-en un exemplaire à l'emplacement prévu à cet effet sur la feuille de transfert.

- Option 2 :

Utilisez la planche d'étiquettes éditable depuis le formulaire de prescription sur HYGEN (<https://hygen.auragen.fr>).

## 2.2 Traçabilité de l'envoi

Compléter le bordereau d'expédition (voir Annexe 1). Joindre une copie de celui-ci dans le colis et conserver l'original dans votre service.

### 3 CONSERVATION

---

#### -Echantillon constitutionnel

*Un délai maximal de 10 jours doit être respecté entre la réalisation du prélèvement et la réception de l'échantillon par notre laboratoire. Durant ce laps de temps, le prélèvement peut être conservé à température ambiante [15-25°C] ou +4°C si la température des locaux n'est pas régulée.*

**Les échantillons doivent nous être acheminés rapidement afin de respecter ce délai.**

**En cas d'impossibilité d'envoi des prélèvements constitutionnels, ceux-ci doivent être stockés à +4°C jusqu'à leur prise en charge par le transporteur.**

#### -Echantillon tumoral FFPE

Conservation à température ambiante [15-25°C]. **Les échantillons doivent nous être acheminés rapidement après leur préparation.**

**Dans la mesure du possible, l'acheminement des échantillons sanguin et tumoral doit être réalisé ensemble.**

**ATTENTION !!!! Le délai d'envoi de l'échantillon sanguin étant de 10 jours, celui-ci doit être envoyé séparément si les tubes de l'échantillon tumoral ne peuvent être prêts dans ce délai.**

### 4 EMBALLAGE

---

- Insertion des tubes dans un sac Diagnobag taille A5 homologué UN3373 muni d'un adsorbant interne.





- Rangement des feuilles de transfert et du consentement coché et signé en accompagnement des tubes dans la pochette externe du sac.
- Une copie du bordereau d'expédition (Annexe 1) doit être jointe au colis.
- Rangement du ou des sacs Diagnobag dans un colis à température ambiante. Caler les sachets Diagnobag dans le colis de manière à limiter l'impact des chocs éventuels.
- Fermeture du colis avec des scellés lorsque le remplissage du colis est terminé et prêt à l'envoi.

## 5 DEMANDE D'ENLEVEMENT

Les demandes d'enlèvement sont à réaliser selon les conditions communiquées par le transporteur, habilité à réaliser ce type de transport depuis les DROM-COM.

Les colis sont réceptionnés sur le LBMMS AURAGEN du lundi au vendredi.

Il est recommandé qu'un mail indiquant qu'un colis a été expédié soit envoyé à l'adresse [AURAGEN.secretariat@chu-lyon.fr](mailto:AURAGEN.secretariat@chu-lyon.fr).

| Echantillons constitutionnels<br>Température ambiante (sang) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|--|-------|-------|----------|-------|----------|
| Jour de prélèvement  | Oui   | Oui   | Oui      | Oui   | Oui      |
| Jour de réception au laboratoire<br>AURAGEN                  | Oui   | Oui   | Oui      | Oui   | Oui      |

**En cas de jours fériés, à voir au cas par cas.**

*Pour contacter le secrétariat d'AURAGEN : 04 72 11 25 40 / 04 72 11 25 50 / [AURAGEN.secretariat@chu-lyon.fr](mailto:AURAGEN.secretariat@chu-lyon.fr)*



**GCS AURAGEN**  
5 place d'Arsonval  
Bâtiment B7  
69003 LYON

**Consigne envoi KC FFPE  
outremer**

**ENR-Pré-062-02**  
Version : 2  
Applicable le : 28-02-2025



ANNEXE 1

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p><b>GCS AURAGEN</b><br/>5 place d'Arsonval<br/>Bâtiment B7<br/>69003 LYON</p> | <p><b>Bordereau d'expédition -<br/>échantillons AURAGEN</b></p> | <p><b>ENR-Pré-058-02</b><br/>Version : 2<br/>Applicable le : 28-02-2025</p> |
|--|---|---|---|

**Merci de joindre une copie de ce tableau dans chaque colis et de conserver l'original**

N° de commande : \_\_\_\_\_

Date d'envoi : \_\_\_\_\_

Nom de la personne en charge de l'envoi : \_\_\_\_\_

Nombre total de tubes dans le colis : \_\_\_\_\_

Service expéditeur ou cachet du service :

Tableau récapitulatif des échantillons expédiés

| Identification du patient<br>(Etiquette patient ou laboratoire<br>ou identifiant de l'échantillon) | N° demande<br>AURAGEN<br>(MR-xxxx, KC-xxxx<br>ou OC-xxxx) | Nombre<br>de tubes | <i>Cadre réservé à<br/>AURAGEN</i><br><br><i>Vérification de la<br/>présence des<br/>prélèvements</i> |
|--|---|--------------------|---|
|  |   |                    | <input type="checkbox"/> <i>Conforme</i><br><br><input type="checkbox"/> <i>Non conforme</i>          |
|  |   |                    | <input type="checkbox"/> <i>Conforme</i><br><br><input type="checkbox"/> <i>Non conforme</i>          |
|  |   |                    | <input type="checkbox"/> <i>Conforme</i><br><br><input type="checkbox"/> <i>Non conforme</i>          |
|  |   |                    | <input type="checkbox"/> <i>Conforme</i><br><br><input type="checkbox"/> <i>Non conforme</i>          |